



ОБЕРЕЖНО!

Медичний кисень!

Пам'ятка

- **НЕ використовуйте** одяг із синтетичних матеріалів під час роботи біля кисневих балонів;
- **НЕ використовуйте** для протирання устаткування та інструменту замаслене ганчір'я;
- **НЕ паліть і НЕ використовуйте** відкритий вогонь у приміщеннях, де зберігаються кисневі балони;
- **НЕ здійснюйте** самостійно ремонт балонів;
- **НЕ розбирайте і НЕ ремонтуєте** вентилялі балонів;
- **НЕ викручуйте** вентиль;
- **НЕ перефарбовуйте** балони та **НЕ змінюйте** написи;
- **НЕ дозволяйте** використовувати балони іншим особам;
- **НЕ використовуйте** балони без наявності в них залишкового тиску 0,05 МПа (0,5 кг/см²).